

Snow Eye Pro

取扱説明書



目次

1. はじめに.....	5
1.1 同梱品	5
1.2 Overview.....	6
6	
1.3 バッテリーの充電	8
2. 使用開始.....	9
2.1 電源on/off.....	9
2.2 モニター／ノートパソコンへの接続	11
2.3 デュアルレンズ	12
3. 主な機能.....	13
3.1. ズーム in/out.....	13
3.2. フォーカスロック	14
3.3. フリーズ	15


3.4.	LED ライト.....	15
3.5.	カラーモード	16
3.6.	レンズの切り替え	17
3.7.	コントラスト	18
3.8.	周波数	19
4.	仕様.....	20


1. はじめに

1.1 同梱品


- Snow Eye Pro 本体
- 電源アダプター
- USB-C ケーブル
- HDMI ケーブル
- 充電ケーブル
- クリーニングクロス
- クローズアップレンズ
- シリコン製レンズカバー
- 取扱説明書

1.2 Overview

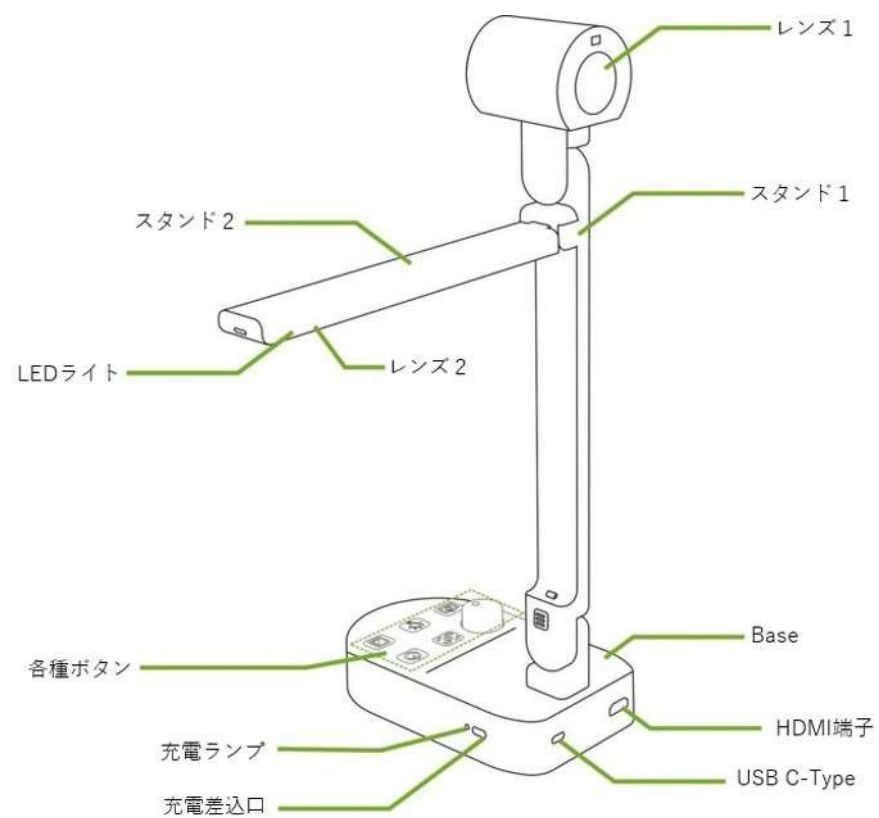

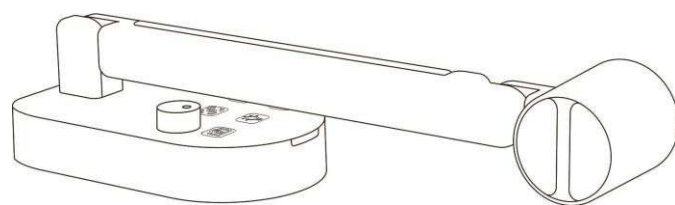


畳む

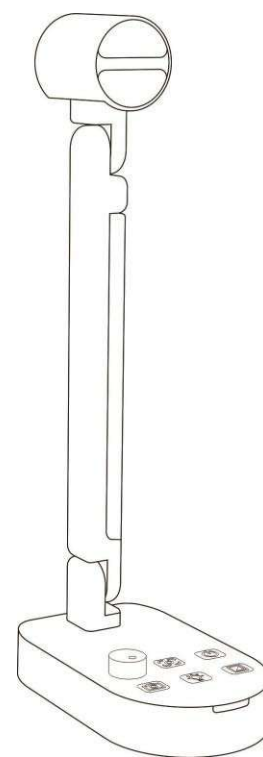

起こす

1.3 バッテリーの充電


- 付属のアダプターとUSB-Cケーブルを使用して、ベース経由で充電してください。充電中はインジケーターが黄色で点灯し、満充電になると緑色で点灯し、エラーが発生した場合は黄色と緑色が点滅します。
- フル充電になるまで通常約4.5時間かかり、約7.5時間の使用が可能です。

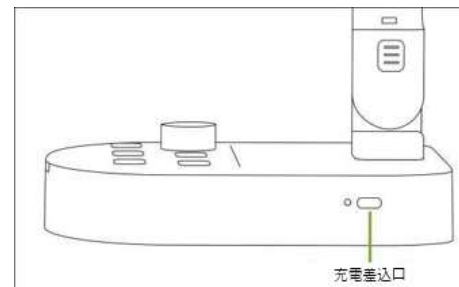

2. 使用開始


2.1 電源on/off

- 電源ボタンを2秒間長押しします。ビープ音が鳴り、ステータスランプが緑色に点灯します。4～5秒後に本機の電源が入ります。
- 電源ボタンを2秒間長押しします。ビープ音が鳴り、ステータスランプが消灯します。約1秒後に本機の電源が切れます。

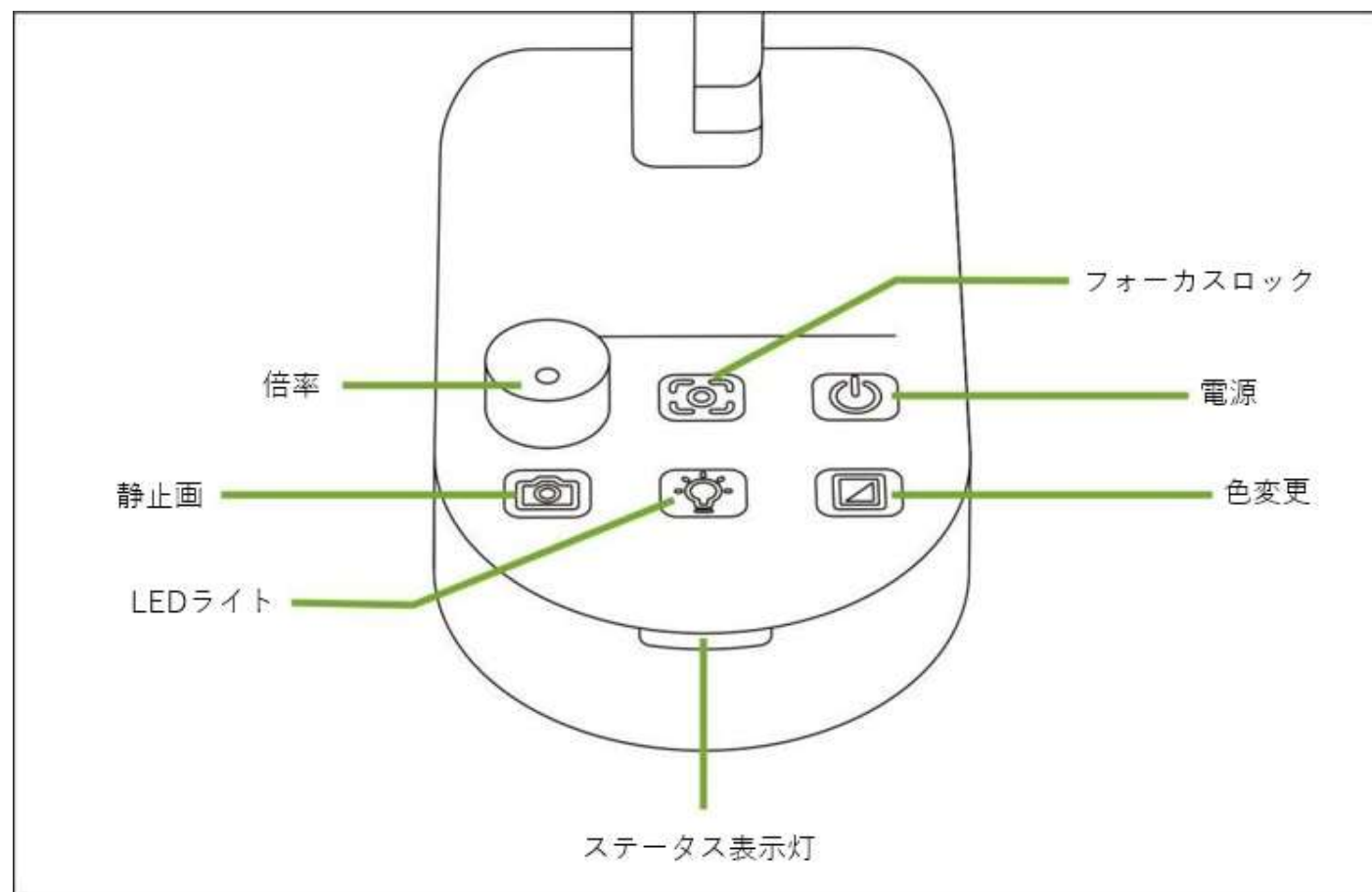

2.2 モニター／ノートパソコンへの接続

- モニターへの接続：HDMIケーブルを使用して、モニターを本機のHDMIポートに接続してください。モニターに接続している場合、分割画面表示機能は利用できません。
- ノートパソコンへの接続：USB-Cケーブルを使用して、ノートパソコンを本機のType-Cポートに接続してください。macOSおよびWindowsに対応しています。
なお、本機からノートパソコンへの充電はできませんのでご注意ください。

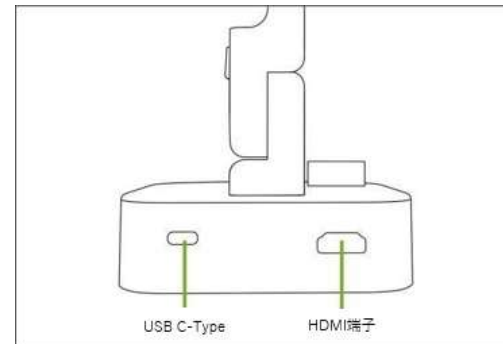

2.3 デュアルレンズ

- レンズ1：7倍光学ズームレンズで、遠距離の観察に最適です。このレンズは手動調整に対応しており、垂直方向のチルト範囲は 55° 、水平方向の回転範囲は反時計回りに 60° 、時計回りに 270° です。

レンズ2：LEDライトを備えたサブレンズです。机上の資料の閲覧、OCR、手書き文字の認識など至近距離での作業に最適です。

- レンズ2を使用するには：垂直スタンドの下にあるボタンを押して、黄色いアームを解放します。アームがテーブルと同じ高さになるまで伸ばしてください。

3. 主な機能

物理ボタンの機能紹介

3.1. ズーム in/out

- ノブを時計回りに回すとズームイン、反時計回りに回すとズームアウトします。ノブを回し続けると、連続的にズームできます。

- 両方のレンズで1～100倍の倍率に対応しています。
- 倍率が最小または最大の限界に達している状態で、ノブを回し続けると、デバイスからビープ音が鳴ります。

3.2.フォーカスロック

- ライブビュー表示中にフォーカスロックボタンを短く押すと、フォーカスがロックされます。もう一度短く押すとロックが解除されます。
- 両方のレンズでフォーカスロックに対応しています。

3.3. フリーズ

- フリーズボタンを短く押すと、画面がフリーズします。もう一度短く押すとフリーズが解除され、ライブビューに戻ります。

3.4. LED ライト

- LEDライトはデフォルトでオフになっています。ボタンを短く押すと点灯します（低輝度）。もう一度短く押すと輝度が上がります（高輝度）。さらに一度短く押すと消灯します。

3.5. カラーモード

- 初回起動時のデフォルトモードは「トゥルーカラー」です。
- カラーボタンを短く押すと、「黒背景／白文字」と「白背景／黒文字」を切り替えることができます。1回短く押すごとに、カラーモードが順に切り替わります。
- カラーボタンを2秒間長押しすると、直接「トゥルーカラー」に戻ります。
- 詳細設定：ズームノブを3秒間長押しすると、画面にすべてのカラーモードが表示されます。ノブを回して移動し、特定のカラーモードを選択します。カラー

ボタンを短押しして、選択したモードを有効または無効にします。無効になっているモードには×マークが表示されます。ズームノブをもう一度3秒間長押しすると、カラーモードの選択画面を終了し、ライブビューに戻ります。合計11種類のカラーモードがサポートされています。

3.6. レンズの切り替え

- ズームノブを1回短く押すと、2つのレンズを切り替えることができます。

3.7.コントラスト

- コントラスト調整は「ハイコントラスト」モードでのみ対応しており、ライブ画面と静止画画面の両方で利用可能です。
- ズームノブとカラーボタンを同時に2秒間長押しすると、コントラストアイコンが表示されます。ノブを回して調整してください。5秒間操作がないと、アイコンは自動的に消えます。
- コントラストレベルは1から10まであり、デフォルト設定は5です。

3.8.周波数

- 周波数には、50Hzと60Hzの2つのオプションがあります。デフォルトの周波数は60Hzです。
- ズームノブとフォーカスロックボタンを同時に短く押すと、画面に50Hzおよび60Hzのアイコンが表示されます。ノブを回してご希望の周波数を選択してください。設定は自動的に保存され、2秒間操作がないとメニューが終了します。

4. 仕様

- 倍率：1～100倍
- カラーモード：11種類の高コントラストカラーモード
- 折りたたみ時サイズ：長さ×幅×高さ 382×105×90mm
- スタンドの高さ：417mm
- カメラ：7倍光学ズームレンズ、オートフォーカス、1920×1080、60FPS
- 重量：約1.5kg
- バッテリー駆動時間：約7.5時間
- 充電時間：約4.5時間
- アダプター：入力 100～240V、出力 5V/3A

修理をご希望の方は、下記までご連絡ください。

株式会社 日本テレソフト
福祉機器事業部

〒167-0034

東京都杉並区桃井2-1-3 葉ビル 3F

T E L:03-6913-5641

F A X:03-6913-5977

E-mail:ts-info@telesoft.co.jp

URL: <http://www.nippontelesoft.com>

購入時の梱包箱は、修理が必要になったときのために保管ください。